


Aspirator do nosa REER RE-79139

// Instrukcja użytkowania

Zakres dostawy i oznaczenie części

1. Miękka końcówka silikonowa
2. Pojemnik zbierający
3. Filtr higieniczny (3 kawałki; możliwość mycia lub sterylizacji parą)
4. Przyłącze węża
5. Wąż
6. Ustnik
7. Higieniczny pojemnik do przechowywania

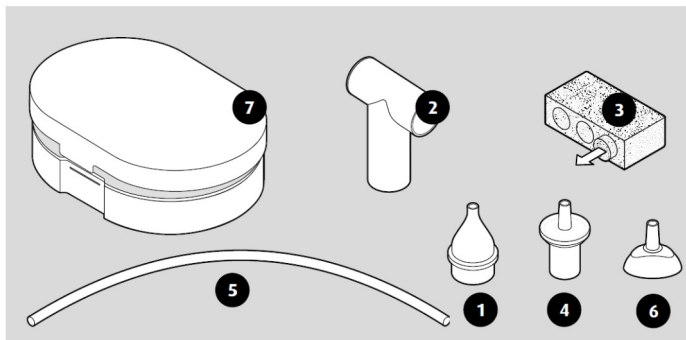

Uwaga!

Produkt ten przeznaczony jest do wspomaganie dziecka w czasie przeziębienia i nie jest lekiem. Jeśli Twoje dziecko jest chore, należy skonsultować się z lekarzem.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy wykorzystywać aspirator do nosa wyłącznie w celu, do którego jest przeznaczony.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić aspirator do nosa pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Nie stosować, jeśli widoczne są oznaki uszkodzeń. W takim przypadku wyrzucić produkt.
- Nie używać aspiratora do nosa przy krwawieniu z nosa lub bólach w jego obrębie. Nie stosować na jamie ustnej ani uszach.
- To nie jest zabawka. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z produktem. Do używania wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Upewnić się przed użyciem, że wszystkie części są dobrze połączone.
- Jeśli części nie wyschną w pełni przed montażem, istnieje ryzyko rozwoju bakterii i pleśni.

Uwaga! Nigdy nie dmuchać w ustnik. Niezastosowanie się do instrukcji może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia Twojego dziecka!

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przygotowanie

Jeśli wydzielina z nosa Twojego dziecka jest zbyt gęsta lub sucha, spróbuj ją upłynnić przy użyciu izotonicznego roztworu soli, aerozolu lub kropli.

W razie wątpliwości lub braku pewności należy skonsultować się z pediatrą.

Sposób użycia

1. Umieścić nowy lub oczyszczony filtr (3) w przyłączy wężyka (4).
2. Połączyć przyłącze wężyka (4) z pojemnikiem zbierającym (2) oraz końcówką silikonową (1).
3. Założyć wąż (5) na oprawkę wężyka na pojemniku zbierającym.
4. Założyć ustnik (6) na końcu wężyka (5).
5. Przyłożyć szczelnie końcówkę silikonową do otworu nosowego dziecka.

Uwaga: Przyłożyć aspirator do nosa ściśle do otworu nosowego – nie dociskając!

6. Wciągać powietrze przez ustnik, dopóki wydzielina z nosa nie znajdzie się w pojemniku zbierającym.
7. Opcjonalnie można usunąć podłączenie węża i wymienić filtr. Filtry zapobiegają przenoszeniu bakterii i są zmywalne. Końcówka jest tak skonstruowana, że błona śluzowa nosa nie ulega uszkodzeniu.

Czyszczenie

1. Bezpośrednio po każdym użyciu aspirator do nosa należy rozłożyć do części składowych.
2. Umyć bezzwłocznie i dokładnie wszystkie części (łącznie z filtrem) w ciepłej wodzie przy użyciu łagodnego środka do mycia naczyń.
3. Spłukać następnie oczyszczone części czystą wodą i pozostawić do pełnego wyschnięcia.
4. W przypadku dłuższego niekorzystania zaleca się ponownie oczyścić i zdezynfekować aspirator do nosa.
5. Czyszczenie w zmywarce tylko na górnym poziomie lub zgodnie z opisem zawartym w punktach 2 – 4.
6. Dezynfekcja w parowniku możliwa jest tylko w górnym koszyku przeznaczonym na małe części lub przez wygotowanie trwające ok. 5 minut.
7. Nie dokonywać dezynfekcji w kuchence mikrofalowej!
8. Po dezynfekcji pozostawić aspirator do nosa do pełnego schłodzenia.

Przechowywanie

Aby zapobiec zmianom tworzywa sztucznego zalecamy chronienie go przed światłem słonecznym.

Trwałość i usuwanie

Zaleca się, aby przy normalnym użytkowaniu aspirator do nosa wymienić na nowy po maksymalnym okresie użytkowania 2 lat. Produkt może być usuwany do odpadów nienadających się do powtórnego przetworzenia i poddany bez problemu termicznemu odzyskowi.

Dystrybutor w Polsce:

STAMAL, ul. Korzeniowskiego 76,
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,
info@stamal.pl

Producent:

Reer GmbH, Postfach 2639,
71206 Leonberg, Germany,
www.reer.de