

# Aspirator do nosa, podpinany do odkurzacza

## RE-79149 reer – instrukcja obsługi

### Najważniejsze cechy

- aspirator do nosa z adapterem do odkurzacza pasujący do prawie wszystkich typowych modeli z wyjątkiem marki Vorwerk
- delikatnie, bezpiecznie i skutecznie usuwa wydzielinę z nosa
- ułatwia oddychanie, spanie i jedzenie dzięki bezpiecznemu użytkowaniu oraz dzięki wyjątkowo miękkiej i elastycznej końcówce
- proste, higieniczne czyszczenie
- można sterylizować parą w sterylizatorze
- można wygodnie, bezpiecznie i bezpyłowo przenosić lub przechowywać dzięki załączonej torbie do przechowywania
- materiał: silikon, tworzywo sztuczne
- wymiary (długość węża): 60 cm
- kolor: przezroczysty
- zawartość: 1x aspirator do nosa
- 3x filtry zamienne
- **Uwaga! Należy uważnie zapoznać się i przestrzegać poniższej instrukcji obsługi i bezpieczeństwa!**

### Produkt zawiera:

1. Miękka silikonowa końcówka
2. Zbiorniczek
3. Filtr higieniczny (3 szt: można go umyć lub wysterylizować parą)
4. Złącze węża
5. Wąż
6. Adapter do odkurzacza
7. Torba do przechowywania

**Uwaga!** Ten produkt ma za zadanie wspierać dziecko w czasie przeziębienia ale nie jest produktem leczniczym. Jeśli Twoje dziecko jest chore, koniecznie zasięgnij porady lekarza.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli produkt wydaje się uszkodzony, nie wolno używać tego egzemplarza, należy go zutylizować.

## **Ryzyko zranienia**

- Nie używaj aspiratora do nosa w przypadku krwawień z nosa lub ran w nosie. Nie stosować na usta i uszy.

## **Ryzyko zadławienia**

- Produkt ten nie jest zabawką. Należ go przechowywać z dala od dzieci.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki razem z tym produktem. Nadaje się do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części są ze sobą solidnie połączone.

## **Ryzyko dla zdrowia**


Jeśli części nie zostaną całkowicie wysuszone przed montażem i ponownym użyciem, istnieje ryzyko rozwoju bakterii i pleśni.

## **Uwaga!**

- Zapewnij wystarczający odstęp pomiędzy dzieckiem a odkurzaczem.
- Nieprzestrzeżenie instrukcji może zagrozić zdrowiu Twojego dziecka!

## **Przed rozpoczęciem użytkowania**

Jeśli wydzielina z nosa jest zbyt twarda lub sucha, spróbuj złagodzić blokadę izotonicznym roztworem soli, sprayem lub kroplami. W razie wątpliwości lub niepewności, koniecznie skontaktuj się z lekarzem pediatrą.

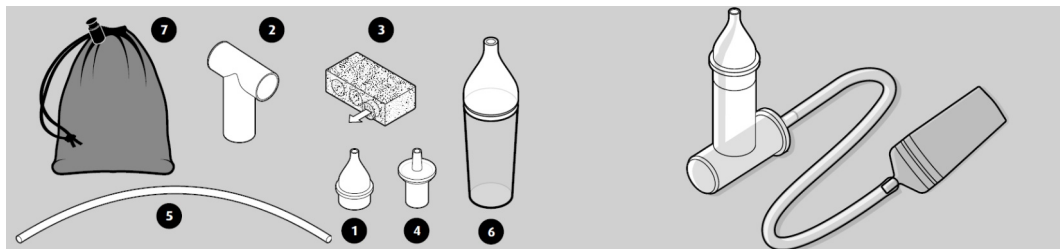

## Używanie produktu

1. Należy włożyć nowy lub wyczyszczony filtr (3) do przyłącza węża (4).
2. Podłączyć przyłącze węża (4) do zbiorniczka (2) i końcówki silikonowej (1).
3. Umieścić wąż (5) na uchwycie węża zbiorniczka
4. Należy włożyć adapter odkurzacza (6) na koniec węża (5) i podłączyć adapter do odkurzacza.
5. Należy włączyć odkurzacza na najniższy poziom i przyłożyć miękką silikonową końcówkę blisko nozdrza dziecka.

**Uwaga!** Należy umieścić aspirator do nosa blisko otworu nosowego ale nie wolno wkładać go do nosa

6. Ssać wielokrotnie przez kilka sekund, aż wydzielina z nosa trafi do zbiorniczka. Powtórz ten proces w drugim nozdrzu. W razie potrzeby można odłączyć przyłącze węża i wymienić filtr. Filtry zapobiegają przenoszeniu bakterii i warto je czyścić. Końcówka ma za zadanie zapobiegać uszkodzeniu błony śluzowej nosa.

## Czyszczenie

1. Zaraz po każdym użyciu trzeba rozłożyć aspirator do nosa na poszczególne części.
2. Natychmiast należy bardzo dokładnie umyć wszystkie części (łącznie z filtrem) ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
3. Trzeba spłukać czyste części świeżą wodą.
4. Należy pozwolić im całkowicie wyschnąć.
5. Nie wolno wkładać wilgotnych części do torby do przechowywania – ryzyko powstania nieprzyjemnych zapachów, bakterii i pleśni!
6. W przypadku dłuższego nieużywania aspiratora do nosa zalecamy jego ponowne wyczyszczenie i wysterylizowanie przed kolejnym użyciem.
7. Czyścić wyłącznie w górnym koszu zmywarki lub zgodnie z opisem w punktach 2 - 4.

8. Dezynfekcja możliwa wyłącznie w górnym koszu sterylizatora parowego lub poprzez gotowanie przez ok. 5 minut.
9. Nie wolno dezynfekować w kuchence mikrofalowej!
10. Po czyszczeniu lub sterylizacji trzeba poczekać, aż aspirator do nosa ostygnie i całkowicie wyschnie.

**Należy zachować dowód zakupu. Ewentualne roszczenia gwarancyjne należy kierować do sprzedawcy detalicznego.**

**Dystrybutor w Polsce:**

STAMAL, ul. Korzeniowskiego 76,  
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,  
[info@stamal.pl](mailto:info@stamal.pl)

**Producent:**

Reer GmbH, Muehlstr. 41,  
71229 Leonberg, Niemcy,  
[www.reer.de](http://www.reer.de)