

2w1: kompres z nasion winogron - przynosi ulgę przy karmieniu piersią RE-31092 reer – instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy:

- wspomaga karmienie, produkt spełnia dwie funkcje: ciepło pobudza wypływ mleka, a zimno łagodzi uczucie napięcia
- lekki i przyjemny w noszeniu elastycznie dopasowuje się do ciała
- kształt piersi lub innych części ciała wszechstronne zastosowanie m.in. również przy napięciu szyi lub pleców
- nadaje się do kucharek mikrofalowych, piekarników i zamrażarek
- ze zdejmowanym pokrowcem umożliwiającym higieniczne czyszczenie (można prać w pralce w temperaturze 30°C)
- kolor: szary
- średnica: ok. 15cm
- warstwa zewnętrzna: 100% bawełna, można ją prać w pralce w temperaturze do 30°C.
- warstwa wewnętrzna 100% bawełna, nie nadaje się do prania
- wypełnienie: 100% pestek winogron
- zawartość: 1 sztuka (ok. 190 g)

Uwaga! Poniższą instrukcję należy uważnie przeczytać a także zachować w bezpiecznym miejscu na wypadek potrzeby odniesienia się do tej treści w przyszłości.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- Tego produktu należy używać wyłącznie w jego pierwotnym przeznaczeniu.
- W przypadku zauważenie oznak uszkodzenia, nie wolno już używać uszkodzonego egzemplarza.
- Produkt ten należy zachować poza zasięgiem dzieci. Wnętrze produktu zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub moga spowodować ryzyko zadławienia.
- Produktu nie należy używać w przypadku przewlekłych schorzeń lub podrażnień skóry.

- Przed podgrzewaniem lub ochłodzeniem poduszki należy zdjąć zewnętrzną materiałową warstwę.
- Uwaga! Aby uniknąć ryzyka zapłonu i pożaru nie wolno podgrzewać poduszki dłużej niż wskazany czas (w dalszej części instrukcji).
- Poduszki nie wolno kłaść bezpośrednio na skórę – zawsze należy wpierw ją włożyć do zewnętrznej materiałowej poszewki
- Przed ponownym ogrzaniem należy poczekać aż poduszka ostygnie do temperatury pokojowej.
- Poduszkę należy przechowywać w czystym i suchym otoczeniu z dobrą cyrkulacją świeżego powietrza.
- W przypadku wątpliwości dotyczących używania produktu, należy wpierw skonsultować się z lekarzem lub położną.

Przed karmieniem/ do używania „na ciepło”

Aby zapewnić ulgę obrzmiałym piersiom i stymulować przepływ mleka matki, warto przyłożyć poduszkę do piersi na kilka minut przed rozpoczęciem karmienia lub przed ściąganiem pokarmu.

- Zawsze należy się upewnić, że zawartość poduszki jest równomiernie rozłożona, aby uniknąć przypadkowego oparzenia
- Przed rozpoczęciem podgrzewania w piekarniku lub mikrofalówce, należy wstawić tam też pół kubka wody na czas podgrzewania. Należy też pamiętać aby taki kubeczek z wodą był odporny na tak wysokie temperatury, tj. żaroodporny.
- Aby podgrzać w kuchence mikrofalowej: należy podgrzewać przez maks. 15 sekund na 750W.
- Należy też upewnić się, że talerz w kuchence mikrofalowej może się swobodnie prawidłowo obracać, a także, że nie ma na nim żadnych resztek jedzenia czy podobnych zabrudzeń.
- Aby podgrzać w piekarniku: należy podgrzewać przez maks. 6 minut w temperaturze około 110°C.

Po karmieniu/ do używania „na zimno”

Po zakończeniu karmienia lub ściągania pokarmu, polecamy używanie mocno schłodzonej poduszki. Używanie na zimno powinno trwać maksymalnie 20-30minut.

- Poduszkę należy włożyć do zamrażalnika w szczelnym, plastikowym worku na czas ok. 1-2 godzin. Po wyjęciu z zamrażalnika i przed przyłożeniem do piersi należy

odczekać 1-2 minuty. Poduszkę należy przykładać do ciała wyłącznie gdy poduszka jest zapięta w wewnętrznej poszewce.

Czyszczenie:

- Samej poduszki z nasionami winogron nie wolno prać!
- Poduszka wykonana z 100% bawełny, ale nie nadaje się do prania, gdyż spowodowałoby to tworzenie się pleśni.
- Zewnętrzna poszewka również wykonana jest z 100% bawełny, można bezpiecznie prać ją w pralce w temperaturze do 30°C. Nie wolno używać wybielacza, nie suszyć w suszarce do ubrań, nie prasować, a także nie czyścić chemicznie.



Roszczenia gwarancyjne i reklamacje należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy detalicznego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu reklamacji.

Dystrybutor w Polsce:

STAMAL, ul. Korzeniowskiego 76,
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,
info@stamal.pl

Producent:

Reer GmbH, Muehlstr. 41,
71229 Leonberg, Niemcy,
www.reer.de