

INSTRUKCJA OBSŁUGI - Kateter rektalny REER

1. UWAGA! WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ten produkt nie jest zabawką!

Zawsze trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru z produktem. Tylko do użytku przez dorosłych.

Sprawdź każdy kateter pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.

Produkt należy wyrzucić po użyciu.

Proszę używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zagrożenie zdrowotne

Nie pozostawiaj produktu w odbycie dziecka.

Jeśli podczas aplikowania poczujesz opór, delikatnie wycofaj i usuń kateter.

Ponowne użycie tego samego katetera może stanowić ryzyko zakażenia.

Nie używaj katetera więcej niż 3 razy w ciągu 24 godzin.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpią zaczerwienienie, podrażnienie lub krwawienie przed, w trakcie lub po użyciu katetera.

Nie używaj katetera, jeśli Twoje dziecko ma bolesny lub podrażniony odbyt.

Nieużywane katetery powinny być wyrzucane po maksymalnie 3 latach.

Wszystkie poważne incydenty związane z produktem muszą być zgłaszane producentowi lub odpowiedniemu organowi państwowemu, w którym mieszka użytkownik.

3. Instrukcja użycia

1. Delikatnie masuj brzuszek swojego dziecka od góry do dołu.
2. Nasmaruj końcówkę katetera oliwką dla dzieci.
3. Unieś nogi dziecka i ostrożnie włóż kateter do odbytu jak kliniczny termometr. Jeśli poczujesz opór, delikatnie wycofaj kateter i usuń go.
4. Po kilku sekundach wyraźnie usłyszysz wydobywające się powietrze z jelit.
5. Teraz wyrzuć użyty kateter do śmieci! Każdego katetera należy używać tylko raz!