

Bransoletka akupresurowa - RE-31031 reer– instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy:

- Wewnętrzna strona opaski stymuluje punkt akupresury Nei Kuan
- elastyczny, przyjazny dla skóry materiał zapewnia wysoki komfort noszenia
- pasują do nadgarstków o obwodzie maks. 16cm
- praktyczne w codziennym użytkowaniu, można je wciąż używać nawet po ciąży
- kolor: czarny
- materiał: poliester/ plastik
- produkt zawiera: 4 sztuki

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa:

- Opaski do akupresury należy używać wyłącznie na zdrowej, niepodrażnionej skórze.
- Nie wolno stosować w przypadku występowania poważnych lub przewlekłych chorób!
- W razie wątpliwości należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub położną.

Instrukcja użycia:


- Opaska do akupresury jest odpowiednia dla osób dorosłych o obwodzie nadgarstka maks. 16cm. W przypadku puchnięcia dłoni należy natychmiast zdjąć opaskę.
- Aby opaski zadziałały, należy je nosić na obu nadgarstkach.



▪ **Jak znaleźć punkt Nei Kuan:** Trzeba użyć trzech środkowych palców, a palec serdeczny należy położyć na zgięciu nadgarstka. Punkt Nei Kuan znajduje się pod palcem wskazującym, pomiędzy dwoma ścięgnami.

Czyszczenie:

Opaski można myć w ciepłej wodzie z mydłem, należy następnie opłukać je w czystej, bieżącej wodzie. Następnie trzeba umieścić opaski w dobrze wentylowanym miejscu, aby wyschły. Nie wolno wybielać, suszyć w suszarce ani też prasować czy prać chemicznie.

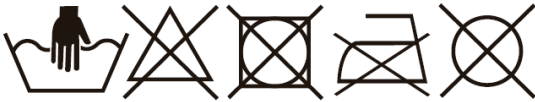

Należy zachować dowód zakupu. Ewentualne roszczenia gwarancyjne należy kierować do sprzedawcy detalicznego.

Uwaga! Poniższą instrukcję należy uważnie przeczytać a także zachować w bezpiecznym miejscu na wypadek potrzeby odniesienia się do tej treści w przyszłości.

Dystrybutor w Polsce:

STAMAL sp. z o.o.
ul. Korzeniowskiego 76,
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,
info@stamal.pl

Producent:

Reer GmbH, Muehlstr. 41,
71229 Leonberg, Niemcy,
www.reer.de