

## Podkłady 2w1poporodowe kompresy żelowe reer RE-31114 Instrukcja



**WAŻNE! Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je do przyszłego użytku.**

### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przerwij użytkowanie, jeśli pojawią się oznaki uszkodzeń.
- Ściśle przestrzegaj instrukcji dotyczących podgrzewania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pęknięcia podkładu żelowego.
- Używaj podkładu chłodzącego wyłącznie do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, medycznego ani terapeutycznego. Nie zastępuje leczenia zalecanego przez lekarza. W razie wątpliwości zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem lub położną przed użyciem produktu.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj w przypadku poważnych i przewlekłych (skórnych) schorzeń.
- Usuń podkłady żelowe z higienicznej osłony przed podgrzewaniem lub chłodzeniem.
- Nigdy nie kładź podkładów żelowych bezpośrednio na skórę.
- Pozwól podkładowi żelowemu ostygnąć do temperatury pokojowej przed ponownym podgrzewaniem.

### Postępowanie w przypadku bezpośredniego kontaktu z żelem:

**Jeśli zawartość żelu wejdzie w kontakt ze skórą lub oczami, natychmiast spłucz wodą. Żel nie jest toksyczny.**

### Instrukcja użytkowania:

- Używaj podkładu chłodzącego maksymalnie przez 20 minut za jednym razem.
- Higieniczna osłona jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

### Użycie na zimno:

Umieść podkład żelowy w zamrażarce na około 1–2 godziny. Przechowuj podkłady żelowe w zamrażarce maksymalnie przez pięć godzin.

### Użycie na ciepło:

**Mikrofalówka:** Podgrzewaj podkłady żelowe przez około 30 sekund w mikrofalówce o mocy 600 W. Jeśli podkład nie jest wystarczająco ciepły, podgrzej go ponownie przez 10 sekund. **Uwaga: Nigdy nie podgrzewaj podkładu żelowego zbyt długo.**

**Gotująca woda:** Podkład żelowy można również zanurzyć w gotującej wodzie na 4–10 minut. Po czterech minutach sprawdzaj podkład żelowy co minutę. Używaj szczypiec do wyjęcia podkładu z wody.

### Instrukcje dotyczące czyszczenia:

Podkład żelowy: Przetrzyj wilgotną ściereczką.

Higieniczna osłona jest produktem jednorazowym i nie nadaje się do prania!

### IMPORTER

STAMAL sp. z o. o.  
Korzeniowskiego 76  
83-000 Pruszcz Gdański, Polska  
info@stamal.pl www.stamal.pl

### PRODUCENT

reer GmbH  
Mühlstr. 41  
71229 Leonberg, Germany  
info@reer.de www.reer.de