

reer mama



Produkt nie nadaje się do wielokrotnego użytku



Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem UV



Przechowywać w suchym miejscu

EC REP Company
Address

WuXi Wemade Healthcare Products Co., Ltd., NO.1060, Antai
3 Road An Town, Xishan
District, Wuxi 214105 China



SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Netherlands

Importeur, Vertrieb & Kundendienst:
reer GmbH
Mühlstr. 41, 71229 Leonberg, Germany
www.reer.de, info@reer.de



Medizinprodukt



31144



Made in China



UDI-DU (PPN): (01)06938799205606



Kinesio tape // Item no. 31144

UWAGA! Przed użyciem dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję

PRZEZNACZENIE

Taśma kinezyologiczna reer mama Kinesio to elastyczna, oddychająca i wodoodporna taśma wykonana z bawełny oraz hipoalergicznego kleju akrylowego. Zapewnia wsparcie w dolnej części pleców, szczególnie w okresie ciąży i karmienia piersią. Efekty stosowania taśm kinezyologicznych nie zostały naukowo udowodnione; nasze twierdzenia opierają się na opiniach użytkowników, położnych oraz na wynikach ich stosowania w sporcie.

Instrukcje bezpieczeństwa:

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Taśma przeznaczona jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej natychmiast usunąć taśmę.

W razie wątpliwości zdrowotnych skonsultować się z lekarzem lub położną przed użyciem.

Taśma jest przeznaczona do użytku prywatnego.

Używać tylko wtedy, gdy opakowanie jest nienaruszone.

Instrukcja użytkowania:

Dokładnie oczyścić skórę z olejków, balsamów i zabrudzeń przed aplikacją.

Taśma przeznaczona jest do łagodzenia bólu w dolnej części pleców (rys. 1).

Usiąść na krześle i lekko pochylić się do przodu.

Należy taśmę zgodnie z poniższymi krokami:

1. Oderwać kilka centymetrów papierowego podkładu na środku taśmy, zgłąć ją na pół i chwycić końce w dłonie (rys. 2).
2. Rozciągnąć środkową część taśmy do około połowy jej długości i przykleić na bolącym obszarze (rys. 3).
3. Usunąć pozostałą warstwę ochronną i przykleić końce taśmy bez naciągania (rys. 3).
4. Aby aktywować klej, pomasać taśmę po aplikacji (rys. 4).

Instrukcja usuwania:

Taśmę można nosić maksymalnie przez 7 dni.

Nie odrywać gwałtownie – delikatnie zdejmować zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.

Najłatwiej usunąć po lub podczas kąpieli.

Materiał:

95% bawełna, 5% spandeks, hipoalergiczny klej akrylowy.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Trwałość i utylizacja:

Okres trwałości taśmy wynosi 3 lata.

Produkt można wyrzucić do odpadów komunalnych.